

Infrarot-Thermometer

Genauere Messergebnisse im berührungslosen Modus

Produkteigenschaften

- Infrarot-Technologie
- Präzise und zuverlässig
- Induktive Messung
- Saubere Anwendung
- Sicher für Kinder und Erwachsene
- Deutsche Sensortechnologie



Ihre Vorteile

Das LFR30B von LEPU ist ein Infrarot-Stirnthermometer mit deutscher Sensortechnologie. Es ist geeignet für die berührungslose Messung der Körpertemperatur des Menschen. Es zeigt die Temperaturwerte aus einem Abstand von bis zu fünf Zentimeter und liefert ein überlegenes Gesamt-Wärmebild. Fieber kann ein Indiz auf eine Infektion mit SARS COV-2/COVID-19 sein.

Wirkungsweise

Ohne Berührung, schon bei unmittelbarer Nähe zur Haut/zum Objekt, zeigt das Infrarot-Thermometer die aktuelle Temperatur.

Das Gerät ändert die Displayfarben je nach Temperatur:

Grün = kein Fieber

Orange und Rot = Fieber

Messwerte sind dadurch leicht zu verstehen.

Temperaturbereich

Messbarer Temperaturbereich:

32,0 Grad C - 42,9 Grad C

Anwendung

Die Bedienung ist einfach, sie erfolgt über eine Taste. Es ist keine Schulung erforderlich. Anwendungen im privaten Bereich sowie im Arbeitsumfeld, zum Beispiel wie das thermische Screening von Besuchern in Unternehmen und allen Arten von öffentlichen und medizinischen Einrichtungen.

Bitte beachten

- Bitte halten Sie beim Messen einen Abstand im Bereich von ca. 1 – 5 cm von der Stirnmitte ein, besser zwischen Auge und Stirn.
- Verwenden Sie das Thermometer nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Das Thermometer ist nicht wasserdicht, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten irgendwelcher Art ein.
- Die Thermometermessung ersetzt keine ärztliche Diagnose. Wenn Sie sich unwohl fühlen und die Temperatur mehrmals über 37,5°C gemessen wurde, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Entfernen Sie das Thermometer nicht, bevor Sie den Piep-Ton hören.
- Bitte versuchen Sie, die Temperatur immer an der gleichen Stelle zu messen, da Sie sonst unterschiedliche Ergebnisse erhalten können.
- Berühren Sie den Sensor nicht während der Messung, um eine Fehlmessung zu vermeiden.

Vertrieb:

GECKO Pharma Vertrieb GmbH

Reeshoop 1 | 22926 Ahrensburg | Deutschland

Tel.: +49 4102 - 778920

service@geckopharma.de | www.geckopharma.de

Technische Updates vorbehalten. Abbildungen können abweichen.